




ADN | NUTRICIÓN | VIDA

COMPONENTES DEL KIT GENÉTICO

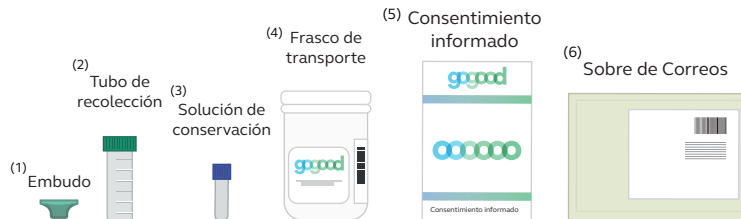

INSTRUCCIONES

IMPORTANTE

Debes proporcionar la muestra **en ayunas**, justo después de levantarte. Además, no fumes, mastiques chicle ni te laves los dientes antes de hacerlo, ya que tales acciones invalidarían la muestra. Si tienes la boca seca, puedes enjuagarte suavemente con agua.

1

Saca el tubo de recolección y el resto de elementos del interior del pack GoGood. Introduce el embudo (1) en el tubo de recolección de muestra (2). Frota tus mejillas con la lengua y dientes para la estimulación de la secreción de saliva.




2

Recoge saliva hasta alcanzar el nivel de la línea de 2 ml, para ello puedes tardar varios minutos. No fuerces ni carraspees para evitar generar mucosidad. Elimina el exceso de burbujas dando golpes en una superficie dura y no las tengas en cuenta en la medición. Los restos de sangre no invalidarán la muestra.

3

Retira y desecha el embudo. Saca el tapón de la solución conservadora de saliva (3) y añade todo su contenido en el tubo de recolección de muestra que contiene los 2 ml de saliva.

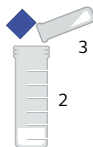

4

Cierra el tubo de recolección de muestra (2) con su tapón verde.



5

Importante: Introduce el tubo de recolección (2) dentro del frasco de transporte (4).



6

La muestra de saliva está ahora conservada y lista para su almacenamiento y envío. Las muestras de saliva recogidas con este kit pueden permanecer a temperatura ambiente (15-25°C).



7

Finalmente introduce el **frasco de transporte** (4) junto con el **consentimiento firmado** (5) en el interior del **sobre** (6) y **entregalo en tu oficina de Correos** más cercana sin coste adicional. Tienes un buscador de oficinas en www.gogoodgenetics.com

8

Te enviaremos una notificación cuando recibamos tu muestra en el laboratorio.

